

4. 介護ロボットおよび介護支援機器・福祉用具の使用法（手順チェックリスト）

1)介護リフト

(4) 介護リフトの使用手順および注意事項

②スタンディングリフト使用手順（チェックリスト）

車椅子からポータブルトイレへ スタンディングリフト「スマイル」

項目	No.	手順	留意点や手順のねらい
使用前の点検	①	使用物品（スタンディングリフト、車椅子、ポータブルトイレ）の準備と点検をする。	
	②	利用者にあいさつをする。	
介助開始時のコミュニケーション	③	これから行うことについての説明を行い、同意を得る。	
	④	利用者の体調を確認する。	
使用前の準備	⑤	車椅子とポータブルトイレの近くにスタンディングリフトを設置する。	スタンディングリフトを車椅子とポータブルトイレに近づけ、最短距離で移乗できる位置にする。
	⑥	スタンディングリフトのブレーキをかける。	
利用者のセットアップ	⑦	スタンディングリフトに利用者をセットアップする。	利用者の身体の固定が不十分だと、移乗時にバランスを崩して転倒の危険があるため注意が必要。
	⑧	利用者の足をベルトで固定する。	
	⑨	利用者の腋窩にベルトを通し、胴体を固定する。	
	⑩	両膝をベルトで固定する。	



	⑪	頭部をスタンディングリフトの台に乗せるようにする。	
スタンディングリフト操作 (持ち上げる)	⑫	介護者はスタンディングリフトのハンドルをしっかりと握り、ハンドルを軽く上の方向に押し上げる。	写真の矢印方向に押しすとロックが解除され、レバーを握ることができる。
	⑬	ハンドルを軽く押した状態のまま、レバーを握り込んで、船をこぐような動作でゆっくりとハンドルを引き、利用者を持ち上げる。	利用者の恐怖心に配慮し、出来るだけゆっくり移動する。
移動	⑭	ハンドルを一番下まで下げた所でレバーを解除し、ロックが効いていることを確認してから、ブレーキを解除してポータブルトイレに移動する。	
	⑮	利用者をポータブルトイレの前にスタンディングリフト移動し、位置を合わせてからブレーキをかける。	
排泄準備	⑯	介護者は利用者の後ろに回り、排泄できるよう、利用者のズボンと下着を降ろす。	
スタン	⑰	ハンドルを軽く下の方向に押し、レバーを握り込む。	



ディング リフト操 作（降り る）	⑱	ハンドルをゆっくりと持ち上げながら利用者をポータブルへゆっくりと降ろす。	利用者の恐怖心に配慮し、出来るだけゆっくり移動する。 ポータブルの位置がずれていたら、もう一度やり直す。
	⑲	着座したところでレバーを解除し、足や膝などのベルトを外す。	
移動後の 安全、安 楽の確認	⑳	利用者の姿勢にゆがみ、ひねりがな いか確認する。	
	㉑	利用者自身に苦痛や体調の悪化がな いか確認する	
排泄後 の対応	㉒	排泄後は、④～⑨の動作によりポー タブルトイレから利用者を持ち上 げ、清拭やズボン上げる等の介助 をおこなう。	

